

JETT PLASMA Medical II

PER OFTALMOLOGIA

GO OFTALMOLOGIA
Distributore esclusivo per l'Italia

JETT

JETT PLASMA Medical II

è un rivoluzionario dispositivo medico brevettato per l'utilizzo in chirurgia ablativa e non ablativa, oftalmologia, estetica e molte altre discipline mediche.

La tecnologia JETT PLASMA si basa sul gas ionizzato al plasma elettrico. Il plasma viene generato automaticamente dall'alta tensione sicura tra la punta del dispositivo e la pelle del paziente. La tecnologia brevettata a corrente continua ci consente di creare una scarica molto sottile e stabile (0,1 mm), grazie alla quale può essere trattata con precisione anche la zona intorno agli occhi. La seconda generazione di JETT PLASMA fornisce una maggiore potenza che rende i trattamenti più brevi e più efficaci.

NUOVO DISPOSITIVO MEDICO BREVETTATO

Per
trattamenti
ablativi&non-
ablativi

Made in the
Czech Republic, EU
EUROPEAN UNION
European Regional Development Fund
Operational Programme Enterprise
and Innovations for Competitiveness

CE 1023



JETT PLASMA Medical II

PER OFTALMOLOGIA

ADATTO A

- Trattamento della blefarite
- Correzione dell'entropion e dell'ectropion
- Trattamento della trichiasi e della distichiasi
- Rimozione dello xantelasma
- Blefaroplastica non chirurgica
- Rimozione delle rughe profonde e superficiali
- Rimozione di verruche, pigmentazioni, fibromi, cuperosi, emangiomi
- Correzione delle cicatrici

VANTAGGI DEL TRATTAMENTO

- Sicuro, confortevole
- Breve tempo di trattamento
- Non chirurgico
- Applicatori speciali per vari trattamenti
- Processo di guarigione rapido
- Effetti di lunga durata
- Niente cicatrici e cheloidi
- Tecnologia unica della corrente continua

APPLICATORI

Applicatori dorati

sono progettati per trattamenti ablativi e causano folgorazione e coagulazione della pelle.


Applicatori d'argento

sono progettati per trattamenti non chirurgici e grazie all'esclusiva tecnologia a corrente continua consentono la depolarizzazione della membrana e l'elettroporazione reversibile a bassa soglia.


Applicatori oftalmici con punte fini

sviluppati per i trattamenti nella zona degli occhi. Consegnato come set d'oro e d'acciaio.

Non-surgical blepharoplasty

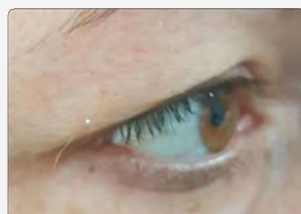

Before

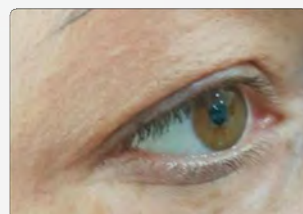


After

Xanthelasma




Before

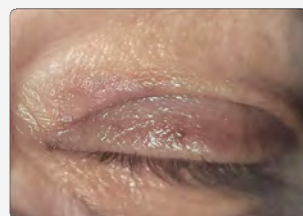

After


Ectropion

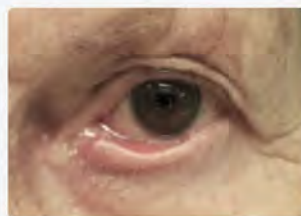

Before



After

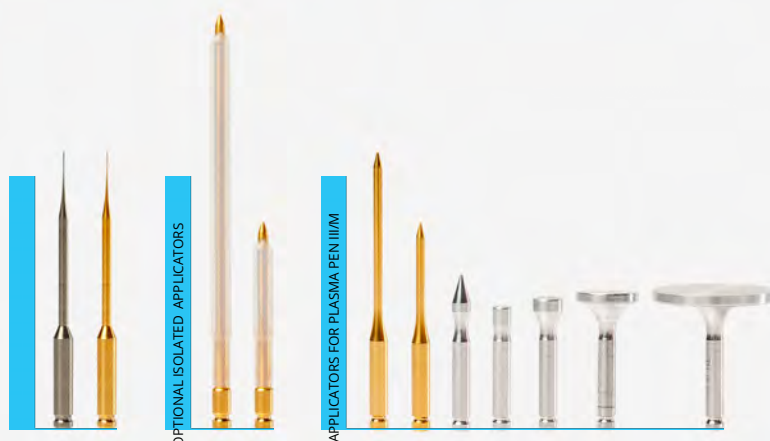

TRATTAMENTO DELLA BLEFARITE

con applicatori argento di JETT PLASMA Medical II

JETT

Grazie all'esclusiva tecnologia a corrente continua dei dispositivi JETT Plasma e ai suoi applicatori in argento che forniscono depolarizzazione della membrana ed elettroporazione reversibile, il trattamento con il suo effetto antinfiammatorio porta alla stimolazione e al rilascio delle ghiandole di Meibomio. La funzione delle ghiandole è stimolata dalla corrente continua, dal calore e dalla pressione esercitata dagli applicatori sulla zona trattata.

BENEFICI DEL TRATTAMENTO

- *sicuro e indolore*
- *nessuna necessità di anestetici iniettabili*
- *nessun tempo morto di guarigione*
- *breve tempo di trattamento*
- *effetto duraturo*
- *comodo*

CASE REPORT

Paziente

- **Uomo di 75 anni**

Anamnesi

- **blefarite cronica con ectropio parziale della palpebra inferiore dell'occhio destro**
- **malattia dell'occhio secco**

Trattamento


- **4 sessioni, ciascuna dopo una settimana**
- **ciascuna palpebra per circa 2 minuti sulla via tarsale e 1 minuto sulla via cutanea**



Applicatori piatti con diametro




PRIMA DEL
TRATTAMENTO

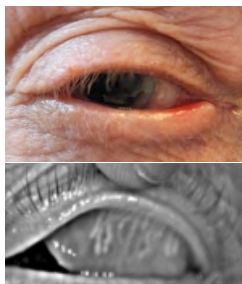

Jenvis Meibo Scale: 2,2

3 MESI DOPO IL
1° TRATTAMENTO

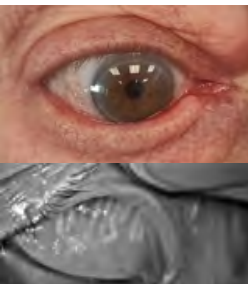

Jenvis Meibo Scale: 2,2

OSDI


before 1st treatment	52
before 3rd treatment	13,63
1st check-up	15,9
2nd check-up	13,63

OTHER DEVICES vs. JETT PLASMA

AC (Alternating current)

DC (Direct current)

PATENTED TECHNOLOGY!!!

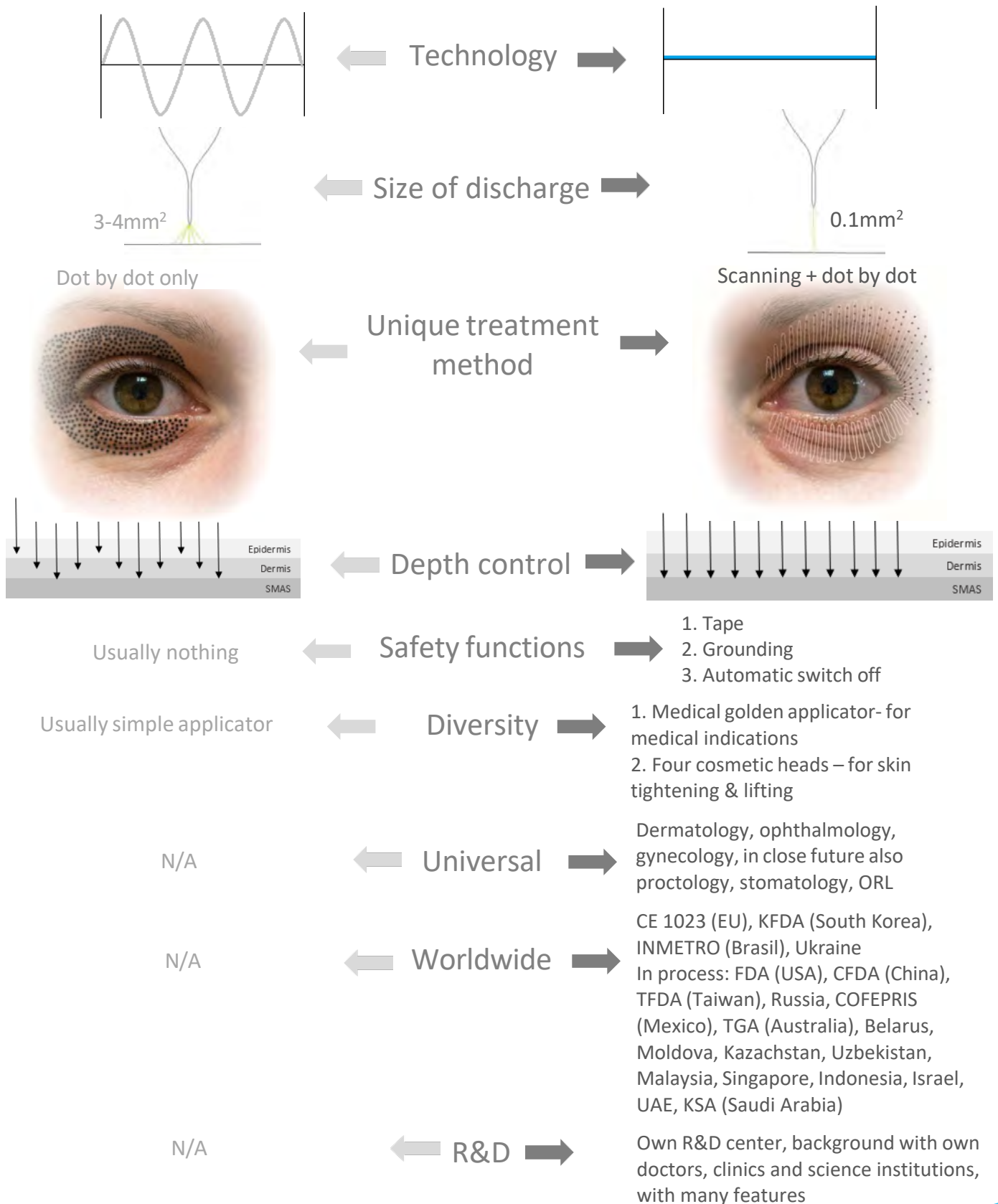

Distributore esclusivo per l'Italia

Per maggiori informazioni e chiarimenti contattare:

Cell. +39 342 8586321 - e.mail: g.vezzani1752@gmail.com